


Snabbmanual Connex[®] ProBP[™] 3400

Reglage, indikatorer och anslutningar

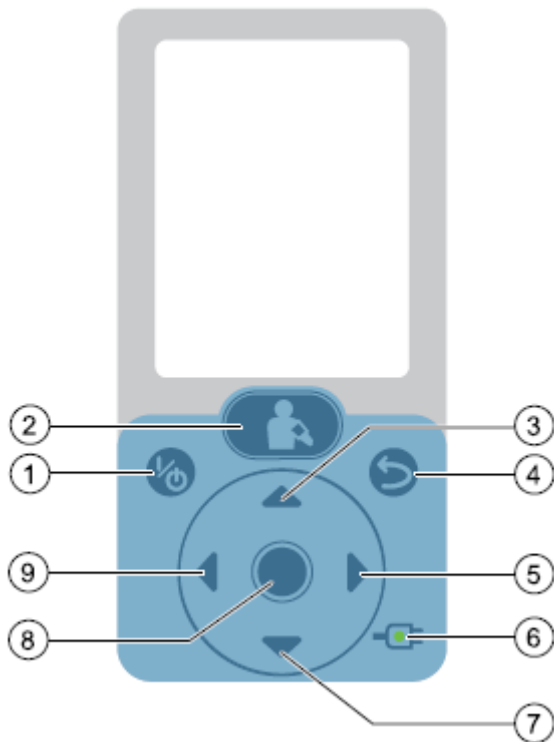


1. **Knapp för ström på/av:** kontrollerar strömmen till enheten.
2. **Knapp för blodtrycksmätning Start/Stopp:** initierar en ny blodtryckscykel från startskärmen. Om knappen trycks ned igen avbryts en aktiv blodtrycksmätning. Denna knapp för användaren tillbaka till startskärmen från någon annan skärm på enheten.
3. **Knapp för navigering uppåt:** markerar det föregående alternativet i Visningsfönstret eller ökar numeriska värden.
4. **Retur-knapp:** för användaren tillbaka till föregående skärm.
5. **Knapp för navigering åt höger:** markerar Inställningsfliken i Visningsfönstret eller markerar alternativen till höger.
6. **Laddar lysdioder:** anger när enheten är ansluten till extern ström och batteriladdningsstatus.
7. **Knapp för navigering nedåt:** markerar nästa alternativ i Visningsfönstret eller minskar numeriska värden.
8. **Val-knappen:** väljer poster som markerats på listan.
9. **Knapp för navigering åt vänster:** markerar Granskningsfliken i Visningsfönstret eller markerar alternativen till vänster

Skärmelement

LCD-modulen (liquid crystal display) kan ange något av följande: systoliskt blodtryck (mmHg eller kPa), diastoliskt blodtryck (mmHg eller kPa), MAP (mmHg eller kPa), pulsfrekvens (b/m), datum, tid, registreringsnummer och batteriladdningsnivå.

Anm Det kan hända att din modell inte har alla de här funktionerna.

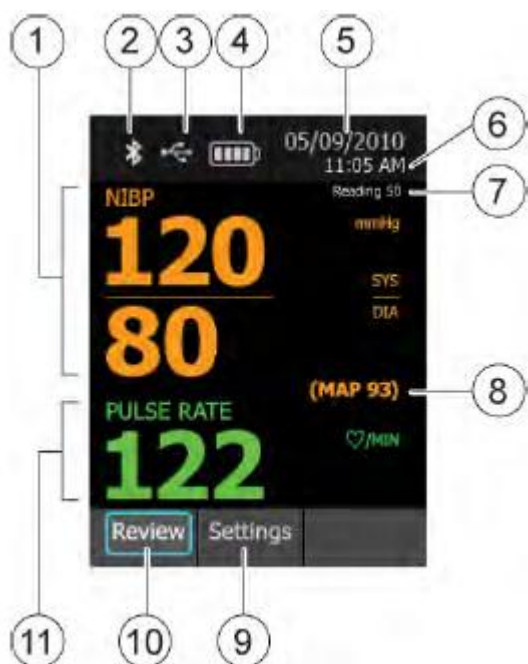

1. **NIBP-skärm:** visar systoliska och diastoliska värden för NIBP-avläsningar.
2. **Bluetooth-radiostatus (om sådan finns):** anger status för Bluetooth-radio.
3. **USB:** anger att USB är ansluten.
4. **Batterinivåindikator:** visar batteriladdningsnivån.
5. **Datum:** visar aktuellt datum.
6. **Klocka:** visar aktuell tid.
7. **Avläsningsnummer identifierat:** visar vilken avläsning enheten står på. ProBP 3400-enheten lagrar upp till 50 avläsningar i minnet.
8. **MAP:** visar MAP-värdet.
9. **Inställningar:** visar menyn Inställningar, när denna valts.
10. **Översikt:** visar menyn Översikt, när denna valts.
11. **Pulsfrekvensskärmen:** visar pulsfrekvensen.

Blodtrycksmätning

Överarmen är den föredragna platsen för blodtrycksmätning för vuxna och barn. Se till att patientens arm är avslappnad och inte rör sig under mätningen/mätningarna.

⚠ VARNING Risk för felaktig mätning. Placera inte manschetten där den kan hämma blodcirkulationen. Placera inte blodtrycksmanschetten på ett ställe med nedsatt cirkulation eller på en extremitet som används för intravenösa infusioner.

⚠ VARNING Blodtrycksmanschetten måste vara rätt placerad för att säkerställa blodtrycksmätningens noggrannhet och patientens säkerhet. En för löst sittande manschett (som förhindrar korrekt uppblåsning) kan resultera i felaktiga NIBP-mätningar.

⚠ VARNING Låt inte blodtrycksmanschetten sitta kvar på patienten i mer än 3 minuter om den är uppblåst över 15 mmHg. För hårt manschettryck kan leda till venstockning, perifera nervskador, missfärgning av armen och obehag för patienten.

⚠ VARNING ProBP 3400 är inte avsedd att mäta blodtrycket på nyfödda patienter. AAMI SP10:2002 standard definierar nyfödda som barn som är 28 dagar eller yngre om de fötts fullgångna (37 veckors havandeskap eller mer) annars upp till 44 havandeskapsveckor.

Gör följande för att initiera blodtrycksmätningar:

1. Tryck på knappen **PÅ/AV** för att slå på enheten.
2. Se till att du använder rätt storlek på blodtrycksmanschetten och linda den runt patientens bara överarm med artärindexmarkören över brakialartären. Lämna utrymme så att du kan föra in högst två fingrar mellan manschetten och armen.
3. Från skärmen Hem, tryck på knappen **Blodtryck Start/Stopp**.

ProBP 3400 blåser upp blodtrycksmanschetten till lämpligt tryck och visar trycket allteftersom blodtrycksmanschetten töms.

Om enheten innehåller SureBP-funktionen (mäter blodtryck vid uppblåsning): Från skärmen Hem, tryck på knappen **Blodtryck Start/Stopp**. ProBP 3400 blåser upp manschetten till lämplig nivå och mäter blodtrycket allteftersom manschetten blåses upp. Den systoliska skärmen visar trycket i manschetten då blodtrycksavläsningen pågår. Om ProBP 3400 inte kan fastställa ett blodtryck medan manschetten blåses upp, p.g.a. patientrörelse, starkt ljud, eller en arrytmi, kommer enheten att försöka mäta blodtrycket medan manschetten töms.

Om du trycker på knappen **Blodtryck Start/Stopp** någon gång under en blodtrycksmätning, avbryts mätningen och manschetten töms snabbt.

När den är klar visar ProBP 3400 systoliskt, diastoliskt, pulsfrekvensmätningar, samt MAPberäkning, om detta aktiverats.

För komplett sortiment besök vår **Nya** webshop: www.ajmedicalshop.se